

ACTIVESHOP[®]


NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

"Azzurro 708A" elektrinis kosmetinis krėslas



Importuotojas:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Lenkija
www.activeshop.com.pl
A/05/2024 redakcija

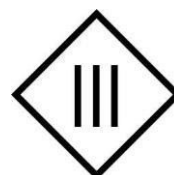


Prieš naudodami kosmetinę kėdutę perskaitykite instrukcijas ir atlikite šiuos veiksmus:

1. Įsitinkinkite, kad visos pakavimo medžiagos pašalintos.
2. Įsitinkinkite, kad sėdynė veikia.
3. Pastatykite kosmetinę kėdutę ten, kur ji bus naudojama.
4. Įjunkite tinklo kištuką į tinkamą lizdą.


Atkreipkite dėmesį! Vaikams ir nepatyrusiems asmenims draudžiama naudotis šiuo prietaisu. Vaikai turi būti prižiūrimi ir negali žaisti šalia kosmetinės kėdutės.

Įrenginio matmenys:

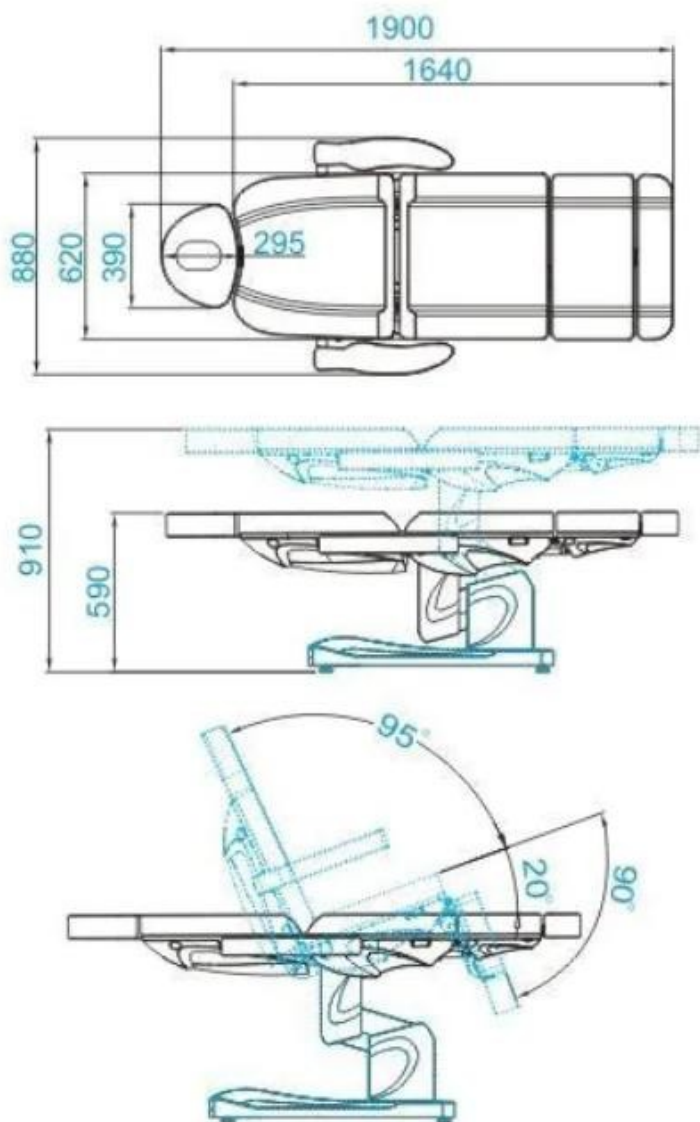

Didžiausia kėdės apkrova: 140 kg.

Įrenginio konstrukcija:

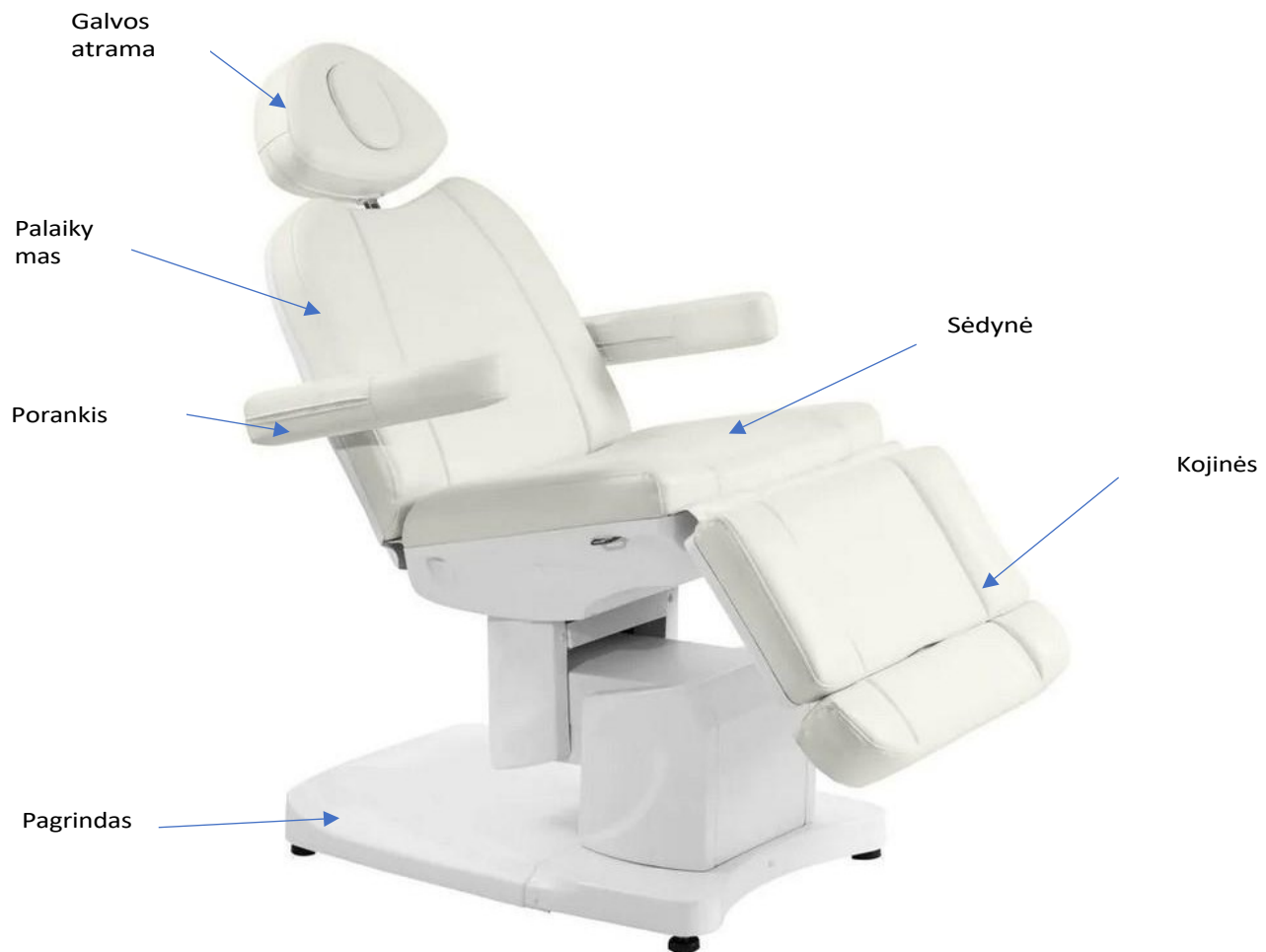

Įrenginio naudojimas:

Sėdynė reguliuojama nuotolinio valdymo pulteliu, kuriuo galima reguliuoti sėdynės aukštį, atlošo ir kojų atramų pasvirimą, taip pat nustatyti sėdynę į lopšio padėtį.


1. Prijunkite maitinimo laidą prie išorinio 110V~240V maitinimo bloko.

Galvos atramų montavimas


Norėdami pritvirtinti galvos atlošą, įstumkite jį į atitinkamą tarpą atlošo viršuje. Kai galvos atramą pastatysite tinkamame aukštyje, priveržkite rankenėlę, kad galvos atrama tvirtai laikytųsi. Norėdami nuleisti galvos atlošą, šiek tiek atsukite rankenėlę, nuleiskite galvos atlošą ir priveržkite rankenėlę.

Porankių atramų montavimas

Įstumkite porankį į atlošo šone esančią angą. Porankis turi būti patikimai pritvirtintas. Pasukite jį į dešinę arba į kairę, kad jis tinkamai įsitvirtintų į vietą.

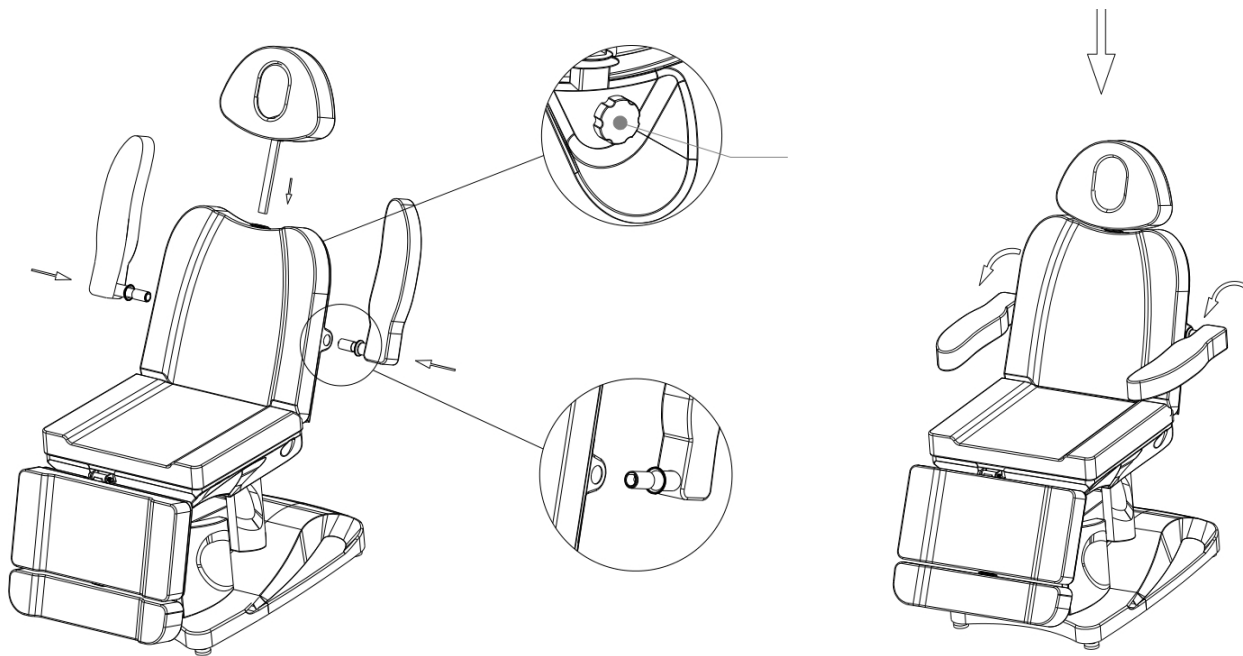


Nuotolinio valdymo funkcijos:

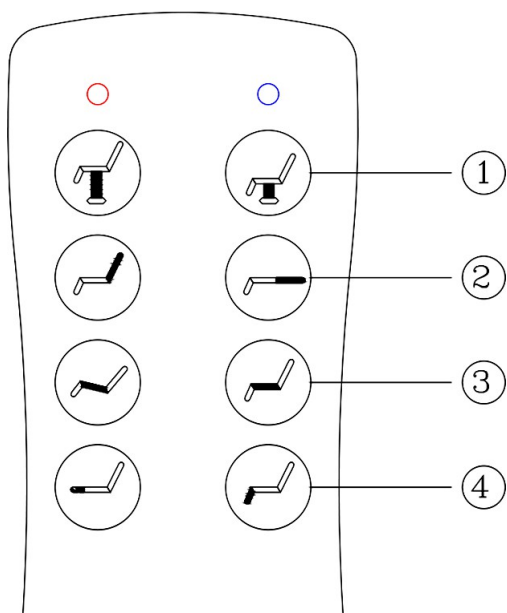

1. Paspauskite  , kad pakeltumėte sėdynę, arba  , kad nuleistumėte sėdynę.
2. Paspauskite  arba  , kad sureguliuotumėte atlošo kampą.
3. Paspauskite  arba  , kad sureguliuotumėte sėdynės kampą.
4. Paspauskite  arba  norėdami sureguliuoti kojų atramos kampą.


Sėdynės aukščio reguliavimas:

Paspauskite , norėdami pakelti sėdynę (kuri yra atsilošimo padėtyje). Paspaudus mygtuką , sėdynė bus nuleista.

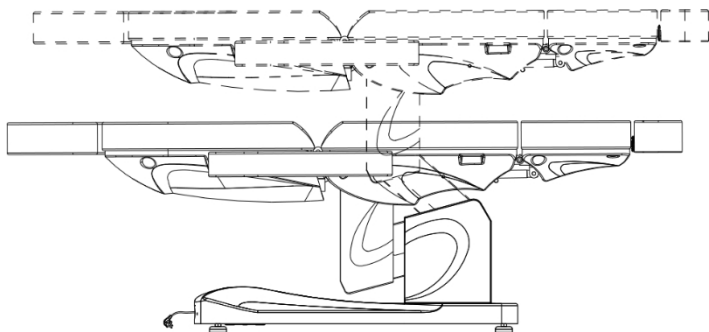


Atlošo reguliavimas:

Paspauskite , norėdami atlošą sureguliuoti į sėdimąją padėtį arba jį pakelti, arba , norėdami atlošą nuleisti (pvz., į gulimąją padėtį).

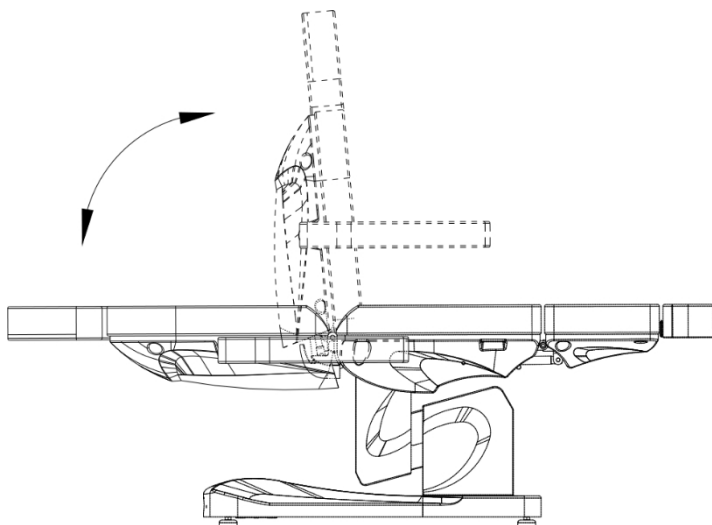


Sėdynės kampo reguliavimas:

Paspauskite  arba , kad sureguliuotumėte sėdynės nustatymo kampą.

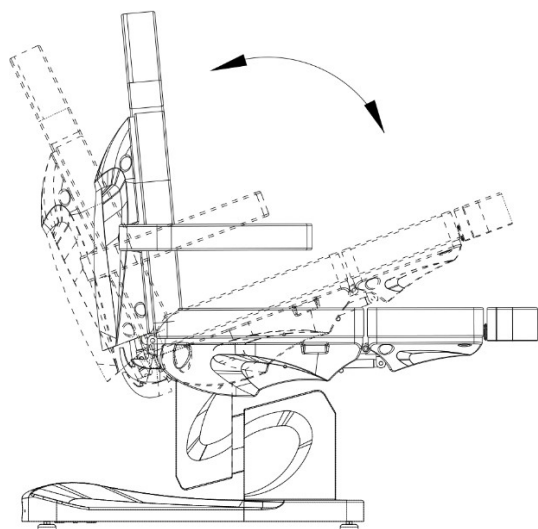



Kojų atramos reguliavimas:

Paspauskite  norėdami nustatyti kojų atramą į horizontalią padėtį (arba ją pakelti), arba  norėdami nuleisti kojų atramą.

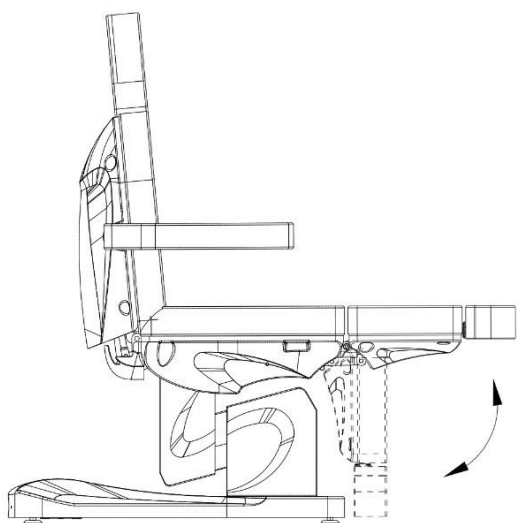

Kojų atramos reguliavimas:

Atlaisvinkite kojų atramos apačioje esančią rankenėlę ir ištieskite ją iki reikiamo ilgio, tada priveržkite rankenėlę.

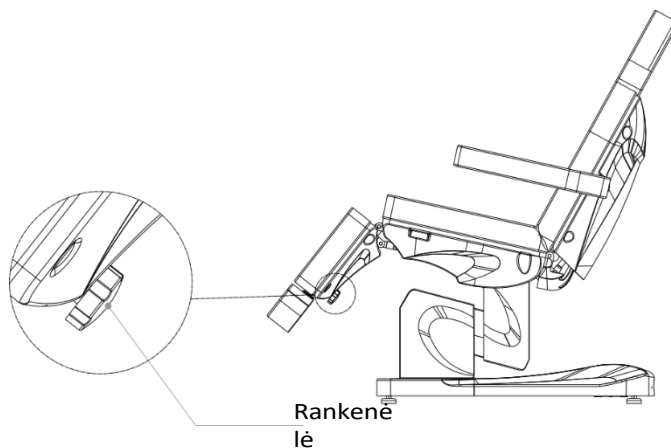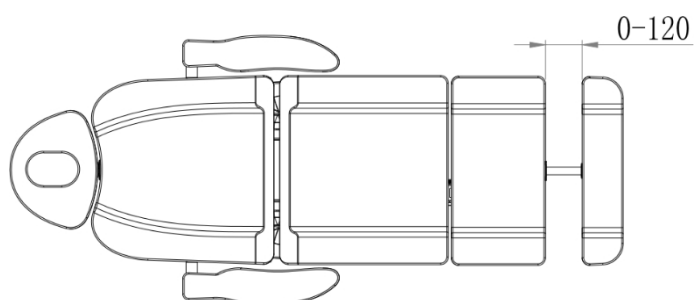

Įrenginio valymas ir dezinfekavimas:

- Prieš valydami prietaisą atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- Kad kėdės paviršius būtų geros būklės, jį reikia reguliariai valyti. Nepamirškite valyti ir dezinfekuoti kėdės po kiekvieno naudojimo. Rekomenduojama kruopščią dezinfekciją atlikti kartą per mėnesį.

I Metaliniai ir plastikiniai paviršiai

- Norėdami nuvalyti metalinius ir plastikinius paviršius bei valdiklius, nuvalykite juos drėgna šluoste. Sunkiai pasiekiamoms vietoms ar kampams valyti tinka nedidelis šepetėlis. Nenaudokite per daug skysčio prietaisui valyti. Tada dezinfekuokite prietaisą tinkamu skysčiu.

II Nerūdijančio plieno paviršiai

- Geriausiai tinka valyti švelniu ploviklio tirpalu. Stiprioms dėmėms pašalinti galima naudoti amoniaką ir daugumą tirpiklių. Venkite chloro turinčių tirpalų.

III Dažyti arba chromuoti metaliniai paviršiai

- Valymui nenaudokite vandens srovių (dušų, aukšto slėgio vandens patrankų).
- Nevalykite esant aukštai temperatūrai ir didelei drėgmei, taip pat nelaikykite įrenginio tokiomis sąlygomis, kurios gali užteršti skysčiu.
- Valymui nenaudokite tirpiklių ar rūgščių.

IV Sėdynės paviršius

- Tolygiai nuvalykite sėdynės paviršių specialiu odos valikliu ir nušluostykite jį švaria, minkšta šluoste.

Techninė priežiūra

Prieš atlikdami techninę priežiūrą atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.

1. Remonto darbus turi atlikti patyrę ir gamintojo įgalioti darbuotojai. Neįgaliotų darbuotojų atliekamas remontas gali sužaloti arba sugadinti prietaisą, už kurį gamintojas neatsako.
2. Naudokite tik originalias gamintojo patvirtintas atsargines dalis.
3. Nenaudokite elektrinio kosmetinio krėslo ar priedų, jei jie tinkamai neveikia. Visi techninės priežiūros ir remonto darbai turi būti dokumentuojami

Problemų sprendimas

Problema	Priežastis	Sprendimo būdas
Nuotolinio valdymo pulto mygtukai nereaguoja.	1. Perjungti įjungtas arba neįjungtas galios valdymas. 2. Fotelis may būti jau maksimalioje padėtyje. 3. Prietaisas neprijungtas prie maitinimo šaltinio.	1. Pabandykite įjungti ir išjungti. 2. Patikrinkite, ar veikia kiti mygtukai. 3. Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas į elektros tinklą. Jei ne, tada juos prijunkite.
Pakeltas ir nuleistas prietaisas skleidžia keistus garsus.	Atsilaisvinęs varžtas.	Patikrinkite i sugriežtinti visus varžtus.
Šviesa neįsijungia, nors jungiklis įjungtas.	Sudegęs saugiklis.	Pakeiskite saugiklį.

SAUGUMO PRIEMONĖS

1. Šis prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti kosmetinėse operacijose. Naudojant prietaisą tik kvalifikuotam kosmetikos specialistų personalui, galima išvengti nepageidaujamo poveikio gydymo metu.
2. Prietaiso negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šiame vadove. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).
3. Nemontuokite ir nenaudokite įrenginio šalia skysčių, drėgnose vietose arba su drėgnomis rankomis - kad į įrenginį nepatektų skysčių.
4. Toliau nurodytais atvejais nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį ACTIVESHOP Ltd. servisą:
a) į prietaisą pateko skysčio, b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus, c) pažeistas maitinimo kabelis, d) prietaisas buvo nuverstas arba pažeistas jo korpusas.
5. Ant kabelių nedėkite jokių daiktų. Nemontuokite įrenginio ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo kabelio.
6. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su įrenginiu.
7. Nieko neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite kabelį iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
8. Nestatykite įrenginio ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs įrenginys gali būti sugadintas.
9. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso veikimo trukmę, rekomenduojama išlaikyti vienos minutės intervalą prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytas specifikacijas. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas gali veikti netinkamai, būti sugadintas ar net sudegti.

PASTABOS:

1. Pažeidus maitinimo kabelį ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite pavojaus.
2. Šią įrangą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra ribotos, kurie neturi patirties ir žinių apie įrangą, jei jie prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis įranga, kad suprastų susijusią riziką.
3. Prietaisas neskirtas žaisti vaikams. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.
5. Šis elektrinis prietaisas nėra žaislas. Neteisingas naudojimas arba sąlytis su elektros prietaisu gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisas turi būti naudojamas ir laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRIETAISO ŠALINIMAS



Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose pagal aplinkos apsaugos taisykles. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų konteinerį. Laikykitės šio tipo įrangos šalinimo taisyklių. Siekiant apsaugoti aplinką pagal Diretyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudota elektros įranga turi būti surenkama atskirai ir perduodama į šiuos surinkimo punktus.

elektroninės ir elektros įrangos atliekų surinkimas. Pasibaigus naudojimo tarnavimo laikui, senuose prietaisuose yra visiškai perdirbamų komponentų, todėl dovanokite

juos perdirbti. Todėl jas reikia atiduoti į atitinkamas surinkimo vietas, taip pat jas galima perduoti ACTIVESHOP Ltd.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Įrenginys turi būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Laikykite įrenginį gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar numesti, paveikti mechaniniais smūgiais ar atmosferos veiksniais.